




tana

WERNER & MERTZ

APESIN SPRAY

Środek dezynfekcyjny do rozpylania o działaniu bakterio- i grzybobójczym

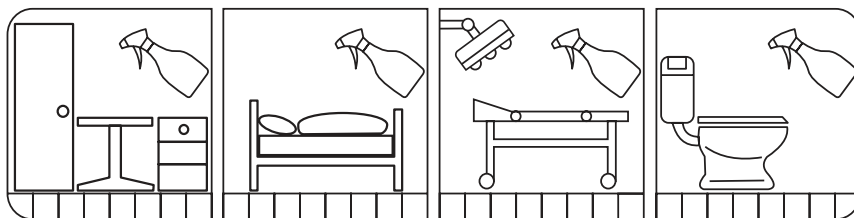

Skład:

APESIN SPRAY zawiera 60÷80% alkoholu izopropylowego oraz olejkii zapachowe.

Działanie:

Szybko działający środek do dezynfekcji powierzchni. Niszczy bakterie, grzyby i wirusy (w tym Hepatitis B i AIDS). Bezbarwny o przyjemnym zapachu, dobrze tolerowany przez skórę. Nie zawiera aldehydów, związków fenoli i chlorowcopochodnych.

Zakres stosowania:

W profilaktyce szpitalnej i w zakładach opieki zdrowotnej. Odpowiedni do dezynfekcji urządzeń, mebli i powierzchni np. armatury, toalet, materacy, stolików itp., a w szczególności do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc. Nie stosować do materiałów wrażliwych na alkohol np. plexiglas.

Sposób użycia/dozowanie:

Stosować nierozcieńczony!

Przedmiot spryskiwać bezpośrednio z odległości 20 – 30 cm do równomiernego pokrycia dezynfekowanej powierzchni lub nanieść na ściereczkę i przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię do całkowitego jej zwilżenia. Czas działania 15 min.

Pokrywanie powierzchni maksymalnie 50 ml/m². Nie spryskiwać dużych powierzchni - nie więcej niż 2m².

Ekologia:

Zastosowane w produkcie składniki ulegają biodegradacji. Dokładne informacje można uzyskać indywidualnie.

Uwagi o bezpieczeństwie:

F



PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY

Xi



PRODUKT DRAŻNIĄCY

Niebezpieczne składniki: 2-propanol.

Produkt wysoce łatwopalny, działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywołać senność i zawroty głowy.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu. Nie wdychać par produktu. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



Art. Nr 0477

1l / 6 butelek

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego
Produkt wrażliwy na działanie niskich temperatur

Nr atestu PZH:

HB/589/95/96

Pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym nr: 0710/04

Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.

ul. Okólna 40, 05-270 Marki k/Warszawy
tel. (0 22) 771 46 71, fax (0 22) 771 46 73